

CPV 022 d)

Gebrauchsanweisung

für den Austausch des Nadelkopfes bei den
KaWe-Lebensweckern

Katalog-Nr. 68020, 68030 und 68075

Alle Nadelköpfe der KaWe-Lebenswecker sind voll sterilisierbar und untereinander austauschbar.


Die nebenstehende Abbildung zeigt die Reihenfolge der Verschraubungen, die abgenommen werden müssen, damit der Nadelkopf ohne Schwierigkeiten ausgewechselt werden kann.




Nach der Abnahme der Schutzkappe (a) wird der Schraubring (c), der den Tiefeneinstellring (b) und den Gummiring (d) trägt, herausgeschraubt. Der Nadelkopf (e) ist nun frei und kann aus dem Gerätekörper herausgeschraubt werden.

Das Einschrauben des Nadelkopfes nach der Sterilisation geschieht im umgekehrten Ablauf wie oben beschrieben.

Um ein einwandfreies steriles Arbeiten mit dem Lebenswecker zu ermöglichen, muß außer dem Nadelkopf (e) der Tiefeneinstellring (b) bzw. der komplett montierte Schraubring (c) einschließlich Tiefeneinstellring und Gummiring sterilisiert werden.

Kirchner & Wilhelm, Stuttgart

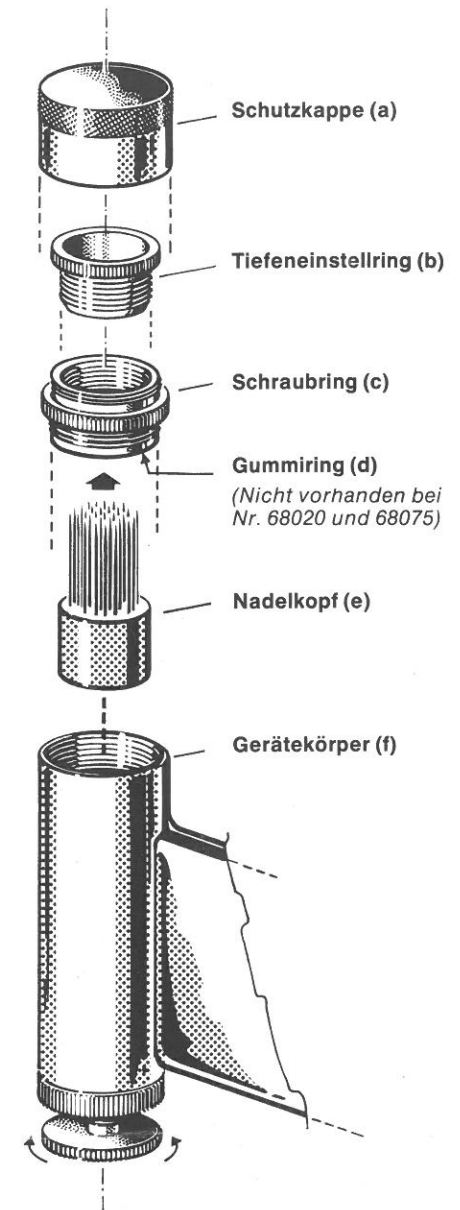

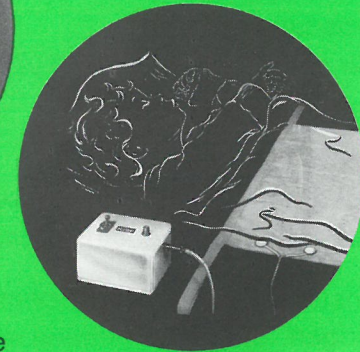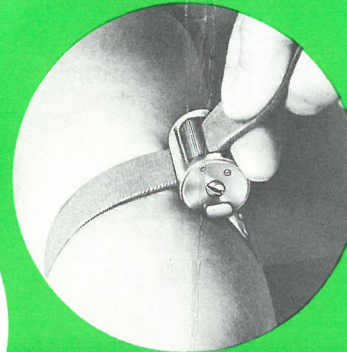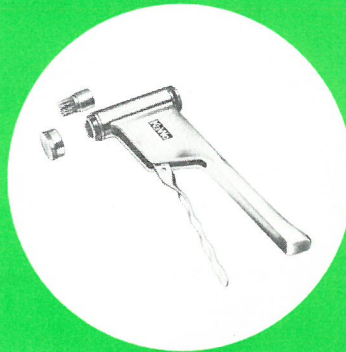

Elija Vd. entre la gama de
instrumentos KaWe! Solicite prospectos!

*Choisissez vos instruments du programme
KaWe. Demandez des prospectus spéciaux.*



KaWe

**Wählen Sie aus dem KaWe-Programm.
Fordern Sie Einzelprospekte an.**

*Choose from the KaWe range.
Ask for individual leaflets.*



KaWe

-Dispetten®