

## KaWe-Lebenswecker nach Baunscheidt "Pistole"

"KaWe-Katalog-Nr. 68070"

### Gebrauchsanweisung

Die Handhabung der "KaWe-Lebenswecker-Pistole" ist problemlos. Zu Beginn der Behandlung wird die Schutzkappe vom Nadelapparat abgeschraubt, sodaß der Nadelkopf sichtbar wird-.

#### Einstellung der Nadeltiefe:

Der Nadelapparat wird in die linke Hand genommen und der schwenkbare Flügel durchgezogen. Durch diese Betätigung springt der Nadelkopf in seine vordere Stellung, sodaß er an der gerandelten Hülse geschraubt werden kann, um die gewünschte Nadeltiefe einzustellen. Die Einstichtiefe wird tiefer, wenn diese Hülse im Uhrzeigersinn gedreht wird bzw. beim Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn nimmt die Einstichtiefe ab.

Die Spitzen der Nadeln sollen normalerweise ca. 1,5 bis 2 mm über den Rand dieser Schraubhülse bei normaler Anwendung des Lebensweckers heraussehen.

#### Auswechseln des Nadelkopfes:

Man greife mit der linken Hand den Hauptteil des Lebensweckers und schraube den gerandelten Gewindingring ab, in welchem die gerandelte Schraubhülse eingeschraubt ist. Der Nadelkopf liegt nun vollkommen frei und kann mittels eines Tupfers, einem Stück Gaze oder ähnlichem mit der rechten Hand aus dem Halter geschraubt werden.

Das Einsetzen des sterilisierten Nadelkopfes geschieht in umgekehrter Weise, wobei wiederum z.B. ein steriler Tupfer in der rechten Hand gehalten wird, um ein Berühren mit dem sterilisierten Nadelkopf zu vermeiden. Nach Aufschrauben eines sterilisierten Gewindingrings mit verstellbarer Gewindehülse ist die "Lebenswecker-Pistole" wieder voll einsatzbereit.

Die Sterilisation des kompletten Lebensweckers ist nicht nötig, wenn nach obiger Anweisung verfahren wird.