

Indikations-Liste

Anhaltspunkte für die Arzt- und Zahnarztpraxis




Diagnose	Wahlweise Schallkopf Nr.	Ansatz des Schallkopfes und Verfahren	Tägliche Behandlungsdauer in Min.
Augenschmerzen	3/4/5	Schallkopf auf die Augenbrauenpartien aufsetzen und leicht streichend behandeln.	1 x 2
Arterienverkalkung Arteriosklerose	1/2/3	Schallkopf unter leichtem Druck zunächst auf die eine und dann auf die andere Halbseite des Nackens aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 5
Asthma	1/3/5	Schallkopf unter leichtem Druck auf die Brust aufsetzen und die ganze Brustseite kreisend und streichend behandeln.	2 x 5
Bindehautentzündung Conjunctivitis	3/4/5	Schallkopf leicht auf die geschlossenen Unter-, bzw. Oberlider aufsetzen und ruhend behandeln.	1 x 2
Blasenentzündung Cystitis	6/7/8	Schallkopf leicht oberhalb der Blase und des Schambeins aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 2
Bluterguß Hämatom	2/3/4	Schallkopf leicht auf die zu behandelnden Partien aufsetzen u. kreisend und streichend in die Randgebiete behandeln.	2 x 6
Bronchitis	2/3/4	Schallkopf leicht auf die Brustseite auflegen und streichend behandeln.	2 x 5
Darmverstopfung Obstipation	1/2/3	Schallkopf leicht oberhalb der Blase aufsetzen und kreisend behandeln.	1 x 2
Erfrierung, lokale Congelatio	3/4/5	Schallkopf leicht auf die erfrorene Körperpartie aufsetzen, — kreisend und streichend behandeln.	2 x 6
Furunkulose	1/3/5	Schallkopf zunächst auf das Geschwür leicht aufsetzen und kreisend behandeln.	2 x 3
	6/7/8	Anschließend dessen Umgebung.	2 x 2
Gallenblasenentzündung Cholecystitis	2/3/4	Schallkopf zunächst leicht auf den Bereich links der Galle aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 4
	3/4/5	Anschließend die Wirbelsäule in gleicher Höhe kreisend behandeln.	2 x 2

Diagnose	Wahlweise Schallkopf Nr.	Ansatz des Schallkopfes und Verfahren	Tägliche Behandlungsdauer in Min.
Gelenkentzündung Polyarthrits	1/2/3/4	Schallkopf leicht auf die Schmerzstellen aufsetzen und kreisend und streichend bis in deren Umgebung behandeln.	2 x 6
Gleichgewichtsstörungen	3/4/5	Schallkopf unter leichtem Druck auf das Felsenbein hinter der Ohrmuschel aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 4
Gerstenkorn Hordeolum	3/4/5	Schallkopf bei geschlossenem Lid leicht über dem Gerstenkorn ansetzen und ruhend behandeln.	2 x 3
Gesichtsnervenlähmung Facialisparese	2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck die Schläfen, Wangen und das Kinn aufsetzen und kreisend und streichend behandeln.	2 x 5
Gewebsernährungsstörungen Tropische Störungen	1/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck auf die Schmerzstellen und deren Umgebung setzen, ruhend behandeln.	2 x 6
Gicht	2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck auf den Gichtknoten setzen und ruhend behandeln.	2 x 5
Hagelkorn Chalazion	3/4/5	Schallkopf bei geschlossenem Lid leicht über dem Hagelkorn ansetzen und ruhend behandeln.	2 x 3
Hautausschlag Ekzeme	1/3/5	Percutane Applikation des vorgeschriebenen Medikamentes! Schallkopf unter leichtem Druck aufsetzen, — streichend und kreisend behandeln.	2 x 3
Harnleiterentzündungen Urethritis	3/4/5	Schallkopf zunächst leicht in die Steißbeingegend setzen und streichend behandeln. Nach einer Pause von etwa 10 Min. beide Leistengegenden wie oben behandeln.	2 x 2 2 x 2
Hüftgelenkentzündung Coxitis	2/3/4	Schallkopf leicht in den Bereich der Hüfte setzen und streichelnd behandeln.	2 x 5
Hüftnervenentzündung Ischias	1/2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck zunächst in den Bereich der Hüftneren setzen, — ruhend und streichend behandeln. Nach einer Pause von etwa 10 Min. in der Beckengegend wie oben.	2 x 6 2 x 5
Klimastörungen	2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck beiderseits der Wirbelsäule über dem Kreuzbein aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 2
Kieferhöhlenentzündung	3/4/5	Schallkopf leicht auf die Schmerzstellen aufsetzen, — streichend und kreisend behandeln.	2 x 6
Kopfschmerzen	2/3/4	Schallkopf zunächst leicht auf die Stirnpartie setzen und kreisend behandeln. — Hiernach Nackenpartie gleitend behandeln.	2 x 3 2 x 2

Diagnose	Wahlweise Schallkopf Nr.	Ansatz des Schallkopfes und Verfahren	Tägliche Behandlungsdauer in Min.
Kopfschmerz Migräne	3/4/5	Schallkopf zunächst beiderseits des Felsenbeins leicht aufsetzen und kreisend und streichend behandeln. Anschließend die Stirnpartie wie oben.	2 x 4 2 x 3
Magenentzündung Gastritis	1/2/3	Schallkopf unter leichtem Druck unterhalb des Brustbeins aufsetzen und zur rechten Seite streichend behandeln.	2 x 2
Mandelentzündung Angina tonsillaris	3/4/5	Schallkopf leicht aufsetzen u. beide Halsseiten streichend behandeln.	2 x 3
Mitesser, Pickel	6/7 8	Schallkopf leicht aufsetzen und ruhend behandeln. — Anschließend Grenzstellen kreisend nachbehandeln.	2 x 4 2 x 2
Muskelentzündung Myositis	1/3/5	Schallkopf leicht auf die Schmerzstellen und die umgebenden Muskelbahnen setzen, — ruhend und streichend behandeln.	2 x 5
Muskelschwund Muskelatrophie	1/2/3	Schallkopf unter leichtem Druck auf die betroffene Muskulatur setzen und ruhend behandeln. Anschließend deren Nervenbahnen.	3 x 5 2 x 3
Nagelbetteiterung Panaritium	5/6/7	Schallkopf ganz leicht auf die Seiten und Umlaufstellen aufsetzen und streichend behandeln.	2 x 3
Nasenhöhlenentzündung	6/7/8	Schallkopf leicht auf die Schmerzstelle setzen und kreisend behandeln.	2 x 5
Nebenhöhlenkatarrh	3/4 7/8	Schallkopf unter leichtem Druck oberhalb der Nasenwurzel aufsetzen und die Stirnpartie und beide Nasenflächen kreisend und streichend behandeln.	2 x 6
Nervenentzündung Neuritis	2/3/4	Schallkopf leicht auf die Schmerzstelle aufsetzen und streichend in Richtung des Nervenverlaufs behandeln.	2 x 4
Nervenschmerzen Neuralgie / Trigemini Occipital-Neuralgie	2/3/4	Schallkopf leicht auf die Schäfen, Wangen und Kinn einseitig setzen und abwechselnd streichend behandeln.	2 x 5
Prellungen	2/3/4	Schallkopf leicht auf die betroffenen Partien setzen und bis in die Umgebung streichend und kreisend behandeln.	2 x 6
Rheuma, Gelenk- Polyarthritits	1/2/3/4	Schallkopf leicht auf die Schmerzstellen setzen und kreisend und streichend bis in deren Umgebung behandeln.	2 x 6
Rheuma, Muskel- Myalgia rheumatica	1/2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck auf die Schmerzstellen setzen und kreisend und streichend behandeln.	2 x 6
Schnupfen	3/4/5	Schallkopf leicht auf die beiden Nasenflügel setzen und abwechselnd ruhend behandeln.	2 x 6
Sehnenscheidenentzünd. Tendovaginitis	3/4/5	Schallkopf leicht auf die Schmerzstelle aufsetzen und leicht streichend behandeln.	2 x 3

Diagnose	Wahlweise Schallkopf Nr.	Ansatz des Schallkopfes und Verfahren	Tägliche Behandlungsdauer in Min.
Siebbeinhöhlenentzünd.	6/7/8	Schallkopf auf die Schmerzstelle setzen und leicht streichend und ruhend behandeln.	2 x 6
Stirnhöhlenentzündung	3/4/5	Schallkopf unter leichtem Druck aufsetzen und kreisend behandeln.	2 x 6
Unterschenkelgeschwür Ulcus cruris	6/7/8	Schallkopf leicht in die Umgebung des Geschwürs setzen und kreisend behandeln.	2 x 2
Vorsteherdrüsenentzünd. Prostatitis	1/2/3	Schallkopf etwa 13 cm unter dem Nabel leicht aufsetzen und ruhend behandeln. Nach einer Pause von einigen Minuten in der Höhe des Kreuzbeines wie oben behandeln.	1 x 4 1 x 1
Wadenschmerzen	2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck auf die Schmerzstellen setzen und streichend von unten nach oben behandeln.	1 x 3
Wechseljahrbeschwerden	2/3/4	Schallkopf unter leichtem Druck beiderseits der Wirbelsäule über dem Kreuzbein aufsetzen und ruhend behandeln.	2 x 2
Zahnbettentzündung Parodontose	5/6/7	Schallkopf nach Vorbehandlung mit Fluorpräparaten leicht auf den inneren und äußeren Gaumen setzen und ruhend behandeln.	3 x 5
Zahnwurzelhautentzünd. Periodontitis	4/5/6/7	Schallkopf nach Vorbehandlung mit Fluorpräparaten leicht auf die Schmerzstellen setzen und ruhend behandeln.	2 x 4
Zahnziehen u. Verheilen Extraktion	5/6/7	Schallkopf leicht in die Umgebung setzen und kreisend behandeln.	2 x 5

Behandlungsköpfe.

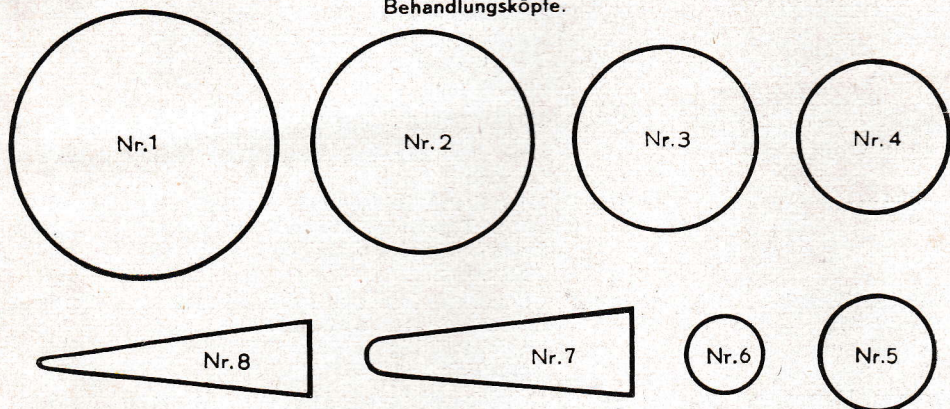

Geliefert wird das Schallgerät

Typ: „STANDARD“ mit Nr. 3 . 7 . 8
 Typ: „SUPER-KOFFER“ mit Nr. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
 Typ: „KLINIK“ mit Nr. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8