


EST 40

Gebrauchsanweisung
Operating manual
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Istruzioni per l'uso

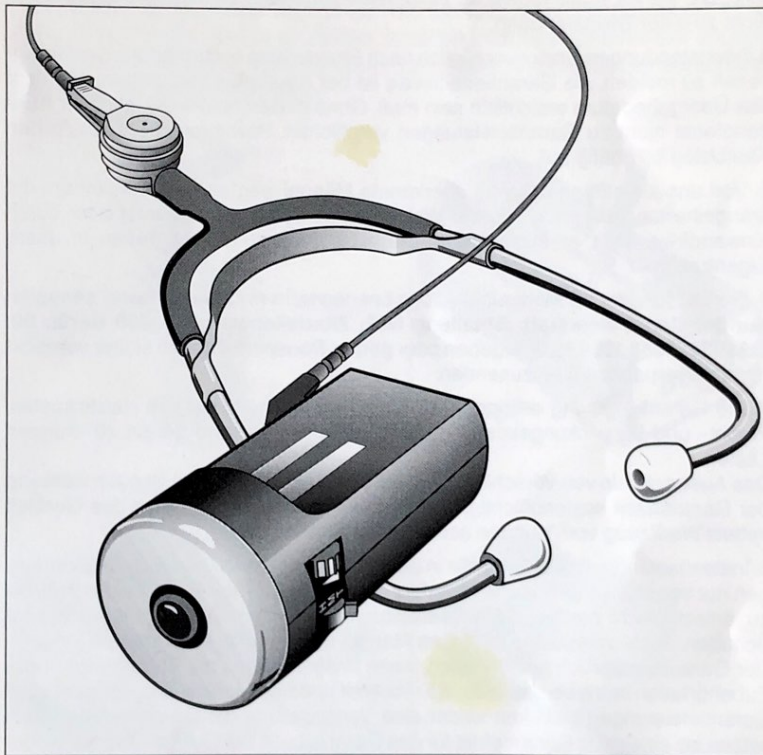

BOSCH

Garantiebedingungen

Gültig für die Bundesrepublik Deutschland nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland übernehmen unsere Landesvertretungen die Gewährleistung. Es gelten die Garantiebedingungen der jeweiligen Landesvertretung.

Für dieses Gerät leisten wir Gewähr gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Innerhalb der Garantiezeit von 12 Monaten beheben wir alle Mängel, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen.

2. Die Garantie bezieht sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile aus Kunststoff. Sie bezieht sich auch nicht auf Teile, die einem natürlichen Verschleiß oder Verbrauch unterliegen, wie Batterien und Verbindungskabel.

Schäden durch unsachgemäße Behandlung, übermäßige Beanspruchung oder Nichtbeachtung der Bedienungshinweise sind von der Garantie ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Veränderungen des Zustands oder der Betriebsweise unserer Erzeugnisse durch chemische, elektrochemische Einwirkungen — hierzu zählen auch ausgelaufene Batterien — sowie durch anomale Umweltbedingungen.

3. Geringfügige Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die für die Gebrauchstauglichkeit unerheblich sind, sowie Änderungen in der Konstruktion und Ausführung, die wir vor Auslieferung an einer Ware allgemein vornehmen, berechtigen nicht zu einer Beanstandung.

4. Beanstandungen sind unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit zu melden. Als Garantienachweis ist der Kaufbeleg vorzulegen, aus dem das Übergabedatum ersichtlich sein muß. Ohne diesen Nachweis ist unser Kundendienst nicht zu Garantieleistungen verpflichtet. Bewahren Sie deshalb den Kaufbeleg sorgfältig auf.

5. Von uns als garantispflichtig anerkannte Mängel werden behoben, indem die mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die ausgetauschten Teile gehen in unser Eigentum über.

6. Geräte, für die eine Mängelbehebung beansprucht wird, sind unserer zentralen **Kundendienst-Werkstatt: Abteilung IME; Zitadellenweg 34, 1000 Berlin 20; Tel. (030) 3388 1266** zu übergeben oder gegen Transportschäden sicher verpackt (Originalverpackung) einzusenden.

7. Die Garantieleistung erbringen wir ohne jede Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Verpackungskosten für den billigsten Versand gehen zu unseren Lasten.

Das Auswechseln von Verschleißteilen durch den Kundendienst ist auch während der Garantiezeit kostenpflichtig, wenn diese Arbeiten ohne Öffnen des Gerätes mittels Werkzeug vom Kunden selbst vorzunehmen sind.

8. Instandsetzungen oder Eingriffe in das Gerät dürfen nach den IEC-Bestimmungen nur von uns vorgenommen werden. Läßt der Anwender Eingriffe durch Dritte zu, erlischt nicht nur der Garantieanspruch. Der Anwender haftet dann voll für Schäden, auch wenn diese auf einen Mangel am Gerät zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehöerteilen betrieben werden, die nicht mit unseren Geräten abgestimmt sind. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiedauer noch setzen sie eine neue Garantiefrist für das Gerät in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zugleich mit der Garantiefrist für das Gerät.

9. Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird auf Antrag des Endabnehmers bis zu 6 Monate nach Übergabedatum entweder kostenfrei Ersatz geliefert oder Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises, jedoch nicht über den marktüblichen Preis hinaus, zurückgenommen.


10. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind ausgeschlossen, soweit eine Haftung nicht gesetzlich angeordnet ist.

DIMEQ

Medizinelektronik GmbH Berlin

Zitadellenweg 34 · D-1000 Berlin 20






Ein Unternehmen der DELFT INSTRUMENTS Gruppe

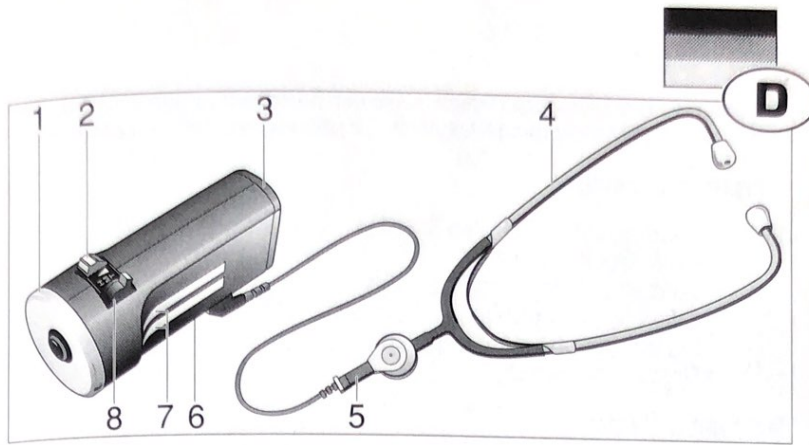


- 1 Membran
- 2 Lautstärkesteller
- 3 Batteriefachdeckel
- 4 Stethoskopbügel

- 5 Verbindungsleitung
- 6 NF-Anschluß
- 7 Sensorschalter
- 8 Frequenzfilter

Das EST 40 ist ein elektronisches Stethoskop. Die Schallphänomene werden verstärkt wiedergegeben. Sie können die Lautstärke einstellen. Mit dem Frequenzfilter können Sie die einzelnen Schallphänomene voneinander abgrenzen. Das Stethoskop ist nur solange eingeschaltet, wie Sie die Sensorschalter berühren. Sie sparen Batterien.

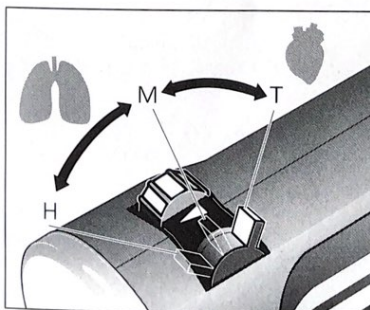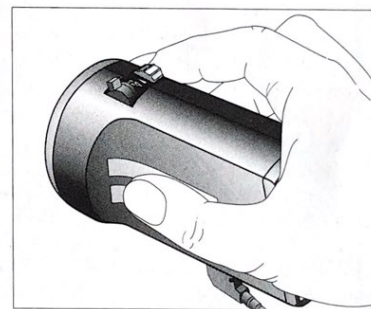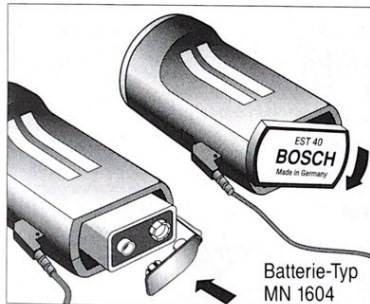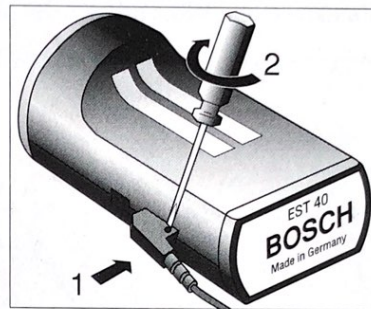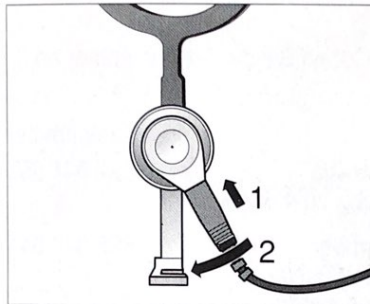

Frequenzbereich wählen

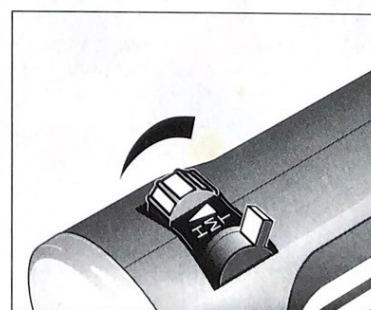

Lautstärke einstellen



Gerät reinigen

Reinigen Sie das EST 40 äußerlich mit einem feuchten Lappen. Feuchten Sie den Lappen mit Wasser, handelsüblichen Desinfektionsmitteln oder Alkohol an.

Störungen beseitigen

Tritt eine Störung auf, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Ist die Batterie entladen?

Fassen die Batteriekontakte richtig?

Ist die Verbindungsleitung unterbrochen?

Können Sie die Störung nicht beseitigen, senden Sie das Gerät an unsere zentrale Reparaturwerkstatt.

Technische Daten

Verstärkung:	bis 40 dB	Betriebsdauer:	ca. 200 h
Frequenzbereich:	H: bis 1000 Hz	NF-Anschluß:	$R_i = 27 \text{ k}\Omega$
	M: bis 500 Hz		$U_A = 20 \text{ mV}$
	T: bis 250 Hz	Maße:	45 \varnothing x 95 mm
Hörer:	Impedanz 400 Ω	Gewicht:	120 g
Batterie:	9V, Mallory MN 1604		(ohne Ohrbügel)

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Lieferumfang

Maßgebend für den Lieferumfang ist die jeweils gültige Preisliste.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

können Sie beim Fachhandel bestellen. Geben Sie die Artikelnummer an.

	Artikelnummer
	Ohrolive (Pckg. zu 4 Stück) 8 697 641 053
	Ohrbügel (ohne Schlauch, ohne Hörer) 8 698 846 844
	Schlauch 8 690 740 586
	Verteiler 8 695 740 792
	Hörer 8 697 640 961
	Verbindungsleitung 0,75 m 8 694 444 256
	Zylinderschraube M 1,4 x 5 2 918 020 823
	Batteriefachdeckel 8 695 541 251
	Batterie Mallory MN 1604 8 697 342 231
	Gerät
	Membran 8 690 540 485
	Abdeckkappe 8 695 541 235