

SIEMENS

Kurzwellen-Therapie

Indikationen und Behandlungsdaten

Erkrankung	Elektrodenart und -größe*) Durchmesser oder Fläche in cm	Lage der Elektrode(n)	Elektroden-/Haut- Abstand in cm	Dosis*)	Behand- lungs- Dauer in Min.	Bemerkungen
------------	---	-----------------------	------------------------------------	---------	---------------------------------------	-------------

Verdauungsorgane

Kardiospasmus	2 GE 13 oder 2 WE 12×18	über dem Schwertfortsatz und dem Rücken in Höhe D 10-12	4-5	II	10 (-15)	auch Komb. mit Reizströmen
Obstipation, spastische	2 GE 13 oder 2 WE 18×27*	a. p., über Abdomen und Lumbalregion	4-5	II	5-10	
Colitis mucosa	2 GE 13 oder 2 WE 18×27*	a. p., über Abdomen und Lumbalregion	4-5	II-III	10-20	
Colitis non ulcerosa	2 GE 13 oder 2 WE 18×27*	a. p., über Abdomen und Lumbalregion	4-5	II-III	5-20	

Urogenitalsystem

Anurie b. Nephritis acuta	2 GE 13 oder 2 WE 18×27*	in Höhe des hinteren unteren Rippenbogens und ventral gegenüber	aktiv 3 inaktiv 5	III(-IV)	30-60	
Epididymitis, Orchitis Cystitis	MONODE 2 GE 13 bis 17* oder 2 WE 12×18 bis 18×27*	über Skrotum über der Blase und am Gesäß	anliegend aktiv 3 inaktiv 6	I I-III	5-10 10-20	
Nephritis, acut. u. chron.	2 GE 13 bis 17* 2 WE 12×18 bis 18×27*	in Höhe des hinteren unteren Rippenbogens und ventral gegenüber	aktiv 3 inaktiv 5	II-III	15-30	
Pyelitis	2 GE 13 bis 17* 2 WE 12×18 bis 18×27*	in Höhe des hinteren unteren Rippenbogens und ventral gegenüber	aktiv 3 inaktiv 5	II-III	15-30	
Prostatitis	2 GE 13	über der Symphyse und über der Dammgegend	aktiv 3 inaktiv 5	III	10	

Gynäkologische Erkrankungen

Adnexitis acuta	2 WE 12×18 bis 18×27* oder 2 GE 13 bis 17*	in Regio pubica und unter dem Gesäß	2-4	II-III	5-10	bei hypophysärbedingter A zusätzliche Hypophysen- durchflutung
Adnexitis chronica	2 WE 12×18 bis 18×27* oder 2 GE 13 bis 17*	in Regio pubica und unter dem Gesäß	2-4	III-IV	10-20	
Amenorrhoe	2 WE 12×18 bis 18×27* oder 2 GE 13 bis 17*	in Regio pubica und unter dem Gesäß oder bitemporal (s. Bemerk.)	2-4	II-III	10	
Douglasabszeß	2 WE 12×18 bis 18×27* oder 2 GE 13 bis 17*	in Regio pubica und unter dem Gesäß	2-4	II-III	5-20	zweckmäßig in den Tagen vor Menstruationsbeginn
Dysmenorrhoe	2 WE 12×18 bis 18×27* oder 2 GE 13 bis 17*	in Regio pubica und unter dem Gesäß	2-4	II	10	